

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

REGULADOR VACÍO - CONTINUO EASYVAL



MODELO

EASYVAL

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 10079-3

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** 101XX


DESCRIPCIÓN

Los reguladores de vacío de la serie EASYVAC son adecuados para todas las aplicaciones de aspiración médica continua en hospitales. El aparato se compone esencialmente de un cuerpo de tecnopolímero que contiene un interruptor rápido I/O, un botón de ajuste del valor de aspiración y un vacuómetro con escala completa variable según el modelo (-250, -600 y -1000 mbar). Una cubierta protectora de silicona evita que el vacuómetro se dañe por posibles golpes durante el transporte o el uso. Es un producto sanitario.



Los reguladores de vacío de la serie EASYVAC también están equipados con una conexión roscada para la conexión directa o indirecta a recipientes de recogida estándar para líquidos aspirados o, mediante una conexión específica, para la conexión directa al recipiente de seguridad EASYSAFE utilizando el regulador de vacío.

La extrema racionalidad y sencillez, combinadas con la sofisticada realización técnica, permiten que tanto los operadores como los pacientes aprecien la seguridad y la funcionalidad de este dispositivo.

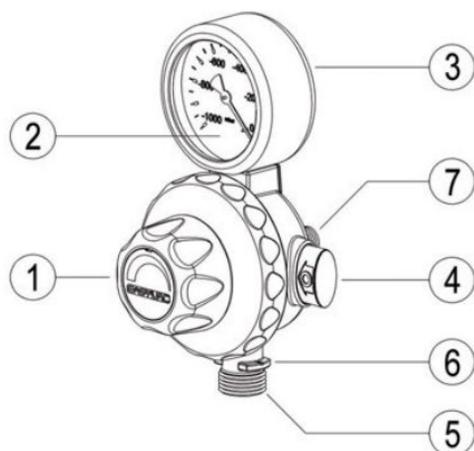

CONFIGURACIÓN

Presión máxima de entrada: - 950 kPa.
Sistema de ajuste del grado de aspiración: membrana.
Todos los componentes son libres de C.V.P. y látex natural.

COMPONENTES PRINCIPALES

1. Botón de ajuste del vacío
2. Vacuómetro de control
3. Cubierta protectora
4. Pulsador 0-I para una rápida conexión/desconexión de la aspiración
5. Conexión roscada para el uso del vacío regulado
6. Sistema de acoplamiento rápido para el sistema de seguridad EASYSAFE
7. Conexión de suministro de vacío

DIMENSIONES: 103x92x170 mm

PESO: Modelo 250: 0,42 kg; Modelo 600 e 1000: 0,37 kg.

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASPIRACIÓN MÁX	TIPO TOMA	RACOR	FILTRO	CAUDAL
118668	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 CON EASYSAFE NF	250 mbar	AFNOR	Toma	EASYSAFE	50 l/min
118674	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 NF	250 mbar	AFNOR	Toma	-	50 l/min
154022	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 RAIL NF	250 mbar	AFNOR	Rail	-	50 l/min
156041	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 CON EASYSAFE RAIL NF	250 mbar	AFNOR	Rail	EASYSAFE	50 l/min
154044	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 250 CON EASYSAFE NF (DOBLE)	250 mbar	AFNOR	Toma	EASYSAFE	50 l/min
118667	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 COM EASYSAFE NF	600 mbar	AFNOR	Toma	EASYSAFE	72 l/min
118673	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 NF	600 mbar	AFNOR	Toma	-	72 l/min
154011	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 RAIL NF	600 mbar	AFNOR	Rail	-	72 l/min
156040	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 CON EASYSAFE RAIL NF	600 mbar	AFNOR	Rail	EASYSAFE	72 l/min
154043	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 600 CON EASYSAFE NF (DOBLE)	600 mbar	AFNOR	Toma	EASYSAFE	72 l/min
118666	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 CON EASYSAFE NF	1000 mbar	AFNOR	Toma	EASYSAFE	80 l/min
118672	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 NF	1000 mbar	AFNOR	Toma	-	80 l/min
154010	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 RAIL NF	1000 mbar	AFNOR	Rail	-	80 l/min
156035	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 CON EASYSAFE RAIL NF	1000 mbar	AFNOR	Rail	EASYSAFE	80 l/min
154042	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 1000 CON EASYSAFE NF (DOBLE)	1000 mbar	AFNOR	Toma	EASYSAFE	80 l/min
150892	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 CON EASYSAFE CM	250 mbar	CM	Toma	EASYSAFE	50 l/min
154037	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 CON EASYSAFE RAIL CM	250 mbar	CM	Rail	EASYSAFE	50 l/min
154024	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 CM	250 mbar	CM	Toma	-	50 l/min

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CONTINUACIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASPIRACIÓN MÁX	TIPO TOMA	RACOR	FILTRO	CAUDAL
154027	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 RAIL CM	250 mbar	CM	Rail	-	50 l/min
154047	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 250 CON EASYSAFE CM	250 mbar	CM	Toma	EASYSAFE	50 l/min
150893	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 CM	600 mbar	CM	Toma	-	72 l/min
150891	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 CON EASYSAFE CM	600 mbar	CM	Toma	EASYSAFE	72 l/min
154036	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 CON EASYSAFE RAIL CM	600 mbar	CM	Rail	EASYSAFE	72 l/min
154026	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 RAIL CM	600 mbar	CM	Rail	-	72 l/min
154046	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 600 CON EASYSAFE CM (DOBLE)	600 mbar	CM	Toma	EASYSAFE	72 l/min
154034	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 CON EASYAFE CM	1000 mbar	CM	Toma	EASYSAFE	80 l/min
154023	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 CM	1000 mbar	CM	Toma	-	80 l/min
154025	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 RAIL CM	1000 mbar	CM	Rail	-	80 l/min
154035	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 CON EASYSAFE RAIL CM	1000 mbar	CM	Rail	EASYSAFE	80 l/min
154045	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 1000 CON EASYSAFE CM	1000 mbar	CM	Toma	EASYSAFE	80 l/min
154039	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 CON EASYSAFE DIN	250 mbar	DIN	Toma	EASYSAFE	50 l/min
154041	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 CON EASYSAFE RAIL DIN	250 mbar	DIN	Rail	EASYSAFE	50 l/min
154030	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 DIN	250 mbar	DIN	Toma	-	50 l/min
154033	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 RAIL DIN	250 mbar	DIN	Rail	-	50 l/min
154048	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 250 CON EASYSAFE DIN	250 mbar	DIN	Toma	EASYSAFE	50 l/min
154038	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 CON EASYSAFE DIN	600 mbar	DIN	Toma	EASYSAFE	72 l/min
150894	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 600 CON EASYSAFE DIN (DOBLE)	600 mbar	DIN	Toma	EASYSAFE	72 l/min
154040	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 CON EASYSAFE RAIL DIN	600 mbar	DIN	Rail	EASYSAFE	72 l/min
154029	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 DIN	600 mbar	DIN	Toma	-	72 l/min
154032	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 RAIL DIN	600 mbar	DIN	Rail	-	72 l/min
154031	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 RAIL DIN	1000 mbar	DIN	Rail	-	80 l/min
150895	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 CON EASYSAFE DIN	1000 mbar	DIN	Toma	EASYSAFE	80 l/min
154028	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 DIN	1000 mbar	DIN	Toma	-	80 l/min
150896	REGULADOR VACÍO EASYVAL DUPLO 1000 CON EASYSAFE DIN (DOBLE)	1000 mbar	DIN	Toma	EASYSAFE	80 l/min
162894	REGULADOR VACÍO EASYVAL 250 BS	250 mbar	BS	Toma	-	50 l/min
162893	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 BS	600 mbar	BS	Toma	-	72 l/min
162895	REGULADOR VACÍO EASYVAL 1000 BS	1000 mbar	BS	Toma	-	80 l/min
150897	REGULADOR VACÍO EASYVAL 600 CON EASYSAFE G1/4" M	600 mbar	-	Toma	EASYSAFE	72 l/min

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNI. VENTA	REF ^a FT
69505	FILTRO EASYSAFE	100	FT030A - ES
69244	FRASCO RECOG MAK 300 C/FILTRO	1	FT032A - ES
132454	VASO SEGURIDAD EASYSAFE PARA REG EASYVAC	1	FT030A - ES
68832	EASYVAL VACUUM PACIFIER REGULATOR	1	-
168399	TUBO SILICONA PARA ASPIRACIÓN 6x12 MM (25M)	1	FT041A - ES